

WARTUNGSPROTOKOLL (ALLE 4 MONATE):

Standort: _____

Serien-Nr.: _____

Prüfer: _____

Prüfdatum: _____

BAUTEIL:	ART DER PRÜFUNG:	IN ORDNUNG:	NICHT IN ORDNUNG:	BEMERKUNG:
Untergestell	Sichtprüfung auf Risse, Beschädigung, Verformung sowie korrekten Sitz des Bauteils			
Liegefläche				
Aufrichteraufnahme				
Netzanschlussleitung				
Zugentlastung				
Verkabelung				
Steuerungsplatine	Funktionsprüfung			
	Risse/Beschädigung			
Personalhandschalter	Funktionsprüfung			
	Schlüsselsicherung			
	Risse/Beschädigung			
Patientenhandschalter	Funktionsprüfung			
	Schlüsselsicherung			
	Risse/Beschädigung			
Rollen/Bremsen	Funktionsprüfung			
	korrekte Verriegelung			
	Verschleiß			
Seitengitter	Funktionsprüfung			
	korrekte Verriegelung			
	Verschleiß			
	Verformung			
Hubmotoren Liegefläche	Funktionsprüfung			
Hubmotoren Untergestell	Funktionsprüfung			
Akkus	Funktionsprüfung			
Gasdruckfedern	Funktionsprüfung			
Aufrichter/Haltegriff	Risse/Beschädigung			
Brückenaufrichter	Risse/Beschädigung			
Brückenaufnahme	Risse/Beschädigung			
Bolzen/Muttern	Festigkeit prüfen			
Schweißnähte	Risse/Beschädigung			



DOWNLOAD WARTUNGSBLATT:

Unter: www.beliving.de/download/wartung_wiedersteinsatz

können Sie das Datenblatt downloaden. Oder QR scannen.

Unterschrift: _____